

## Montageanweisung Oberkörper Positionierung nach Maß

### 1.

Gurtbandenden zwischen Kopfstützrohr - Sitzpolster und Rückenpolster durchführen. Auf der Rückseite des Sitzes mittels Sicherheitsschloss schließen. Nun Gurtband am Sicherheitsschloss spannen



### 2.

Sitzhose mit beigelegtem Plastikschlauch überziehen ( das verhindert, daß das Hakenband sich mit der Flauschoberfläche des Sitzpolsters verhakt zwischen Sitzpolster und Rückenpolster durchführen



### 3.

Sitzhose im Schritt leicht bis zur Taille hochziehen



### 4.

Schultergurte auf der Sitzhose positionieren



**5.**

rechte Seite des Bauchgurtes nach links führen  
danach linke Seite des Bauchgurtes nach rechts  
darüberlegen und mit der Sicherheitsschnalle  
schließen. Gurtband der Sicherheitsschnalle  
( 2F / 3F / SKS 30/50 ) mittels Klett

**6.**

Plastikhüllung der Sitzhose nach hinten raus-  
ziehen

**7.**

Sitzhose mit Flauschoberfläche an der Klett-  
oberfläche des Mittelgurtes befestigen

**Hinweis:**

- Waschanleitung: Chemothermische Desinfektion mit Eltra 40 bei 30 °C
- nicht Schleudern
- nicht in den Trockner geben
- OPS positionierte Person immer zusätzlich mit dem PKW 3 Punktgurt sichern