




## **PELVI.LOC® PL-3DSR - XS, -S, -M, -L, -XL**

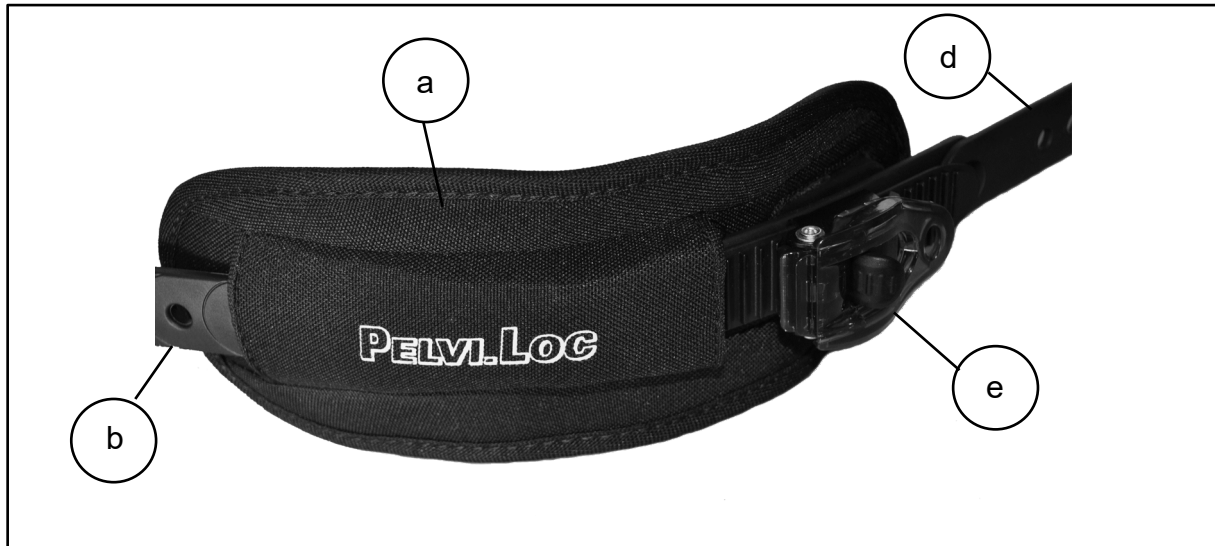

Lea y siga estas instrucciones de montaje y uso antes del primer uso para una aplicación segura de este producto.



### **Ámbito de aplicación**

El **PELVI.LOC®** PL-3DSR sirve para las personas con movilidad reducida, especialmente para el posicionamiento de la cadera en la silla de ruedas y la silla de ruedas activa, evitando que se deslice hacia adelante.

### **Grupo de pacientes previsto:**

- Niños, adolescentes y adultos
- Sexo: femenino y masculino

### **Control de recepción**

Desembale este producto por completo y compruebe que el envío esté íntegro y no presente daños de transporte. Si detecta que el envío, en contra de lo esperado, presenta un fallo, proceda de la siguiente manera:

1. Presente una reclamación al transportista de inmediato.
2. Encárguese de que se registre el daño / fallo.
3. Infórmenos a nosotros o a su vendedor especializado de inmediato.

### **Volumen de suministro**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DSR -XS, -S, -M, -L, -XL no premontado
- 2) 1 x información para descargar las instrucciones de montaje y uso en línea

## Montaje



El montaje debe ser realizado por una persona con conocimientos técnicos.

1. Los acolchados (a) deben estar junto a la zona de los muslos. – La banda dentada (b) se fija en la silla de ruedas.
  - ¡Después, el logo del acolchado podrá leerse desde delante!
2. Ajuste la distancia de los acolchados a través de la correa perforada (d). La correa de retracción pélvica se tensa accionando las hebillas de trinquete (e).
  - La articulación de la correa perforada deberá situarse entonces en el centro entre los acolchados.
  - Se debe tirar de la banda dentada como máximo hasta que queden libres dos dientes detrás de cada hebilla de trinquete (e).
  - Para ajustarlo, puede soltarse la cinta de velcro (g) e insertarse el acolchado (solo a tener en cuenta en las correas con hebillas de trinquete cubiertas).
3. A continuación, fije la banda dentada (b) al tubo del bastidor de la silla de ruedas.
4. Tense la banda dentada (b) por los dos lados de manera homogénea hasta que quede solo hueco para una mano abierta entre el muslo y el acolchado.
5. En caso necesario, pueden acortarse los extremos de la banda dentada de forma semicircular. En caso necesario, desbarbe los extremos de la banda dentada cortada. – ¡Peligro de lesiones!
6. ¡Revise el asiento fijo y la retención a ambos lados de la banda dentada!



## Instrucciones de uso



### Indicaciones de seguridad

A pesar de las construcciones estables, componentes como las correas perforadas, las tiras de las correas, las bandas dentadas y los acolchados están sujetos a un cierto desgaste. Por ello, se recomienda controlar a fondo el **PELVI.LOC**<sup>®</sup> cada 3 meses. ¡Aquí se debe prestar atención también al asiento fijo de las uniones de remaches y atornilladas!

- Convéznase de que el estado del producto permite su uso y de que está asentado correctamente – ¡Peligro de lesiones!
- No remiende, pegue ni vuelva a utilizar componentes dañados, como correas perforadas/tiras de correas (d), la banda dentada (b) o los acolchados (a) – ¡Peligro de accidente!
- No se sienta sobre los acolchados – ¡Peligro de puntos de presión, especialmente por los trinquetes (e)!
- No eleve la silla de ruedas por encima del **PELVI.LOC**<sup>®</sup> - ¡Peligro de accidente!
- Preste atención a no poner las manos entre la correa perforada y los tubos del bastidor o del asiento - ¡Peligro de aplastamiento!

### Limitaciones del uso / efectos secundarios no deseados

- No utilice el **PELVI.LOC**<sup>®</sup> si hay puntos de presión, heridas u otras lesiones no curadas en la zona de los acolchados – ¡Peligro de lesiones!
- No utilice el **PELVI.LOC**<sup>®</sup> en caso de osteoporosis, huesos de cristal o trastornos graves de la circulación – ¡Peligro de lesiones!

- ¡Asegure el correcto funcionamiento del **PELVI.LOC**<sup>®</sup> después de limpiarlo!
- Un **PELVI.LOC**<sup>®</sup> dañado debe cambiarse a la mayor brevedad posible – ¡Peligro de accidente!



### **Atención:**

- El **PELVI.LOC**<sup>®</sup> no forma parte del sistema de retención para la silla de ruedas o los pasajeros en el transporte en un sistema de transporte de minusválidos.
- En el sentido de la responsabilidad por productos, ni el productor ni el distribuidor pueden asumir responsabilidad por los daños o riesgos que se produzcan en relación con el producto por dejar a niños sin supervisión.

## **Modo de empleo**

1. Para utilizar el **PELVI.LOC**<sup>®</sup> se colocan los acolchados (a) pegados a los muslos.



**Atención:** ¡Preste atención a que no haya ningún objeto bajo el acolchado! De este modo evitará dolorosos puntos de presión.

2. **Importante:** ¡no colocar junto a la cadera o la espina!
  3. Después, pase la banda dentada (b) por el trinquete correspondiente. Para ello, accione la hebilla de trinquete (e) correspondiente.
  4. A continuación, tense la banda dentada (b) hasta que quede solo hueco para una mano abierta entre el muslo y el acolchado.
  5. ¡Asegúrese de que los pestillos de la hebilla de trinquete (e) agarren los dientes de la banda dentada!
- ¡Haga una prueba de tracción!

Si el sistema de posicionamiento **PELVI.LOC**<sup>®</sup> se suelta de forma no deseada al usarse, puede solucionarlo volviéndolo a tensar.

**Para abrir el **PELVI.LOC**<sup>®</sup>**, accione el pestillo de la hebilla de trinquete (e) y saque la banda dentada.

- ¡Preste atención a que los acolchados no queden atrapados entre los radios de la rueda de accionamiento!

## **Limpieza y desinfección**

- Apto para la lavadora hasta a 40 grados.
- Es posible la desinfección quimicotérmica añadiendo ELTRA 40 en cada lavado.
- No centrifugar
- No apto para la secadora

## **Mantenimiento**

Deben comprobarse periódicamente los daños y el funcionamiento del **PELVI.LOC**<sup>®</sup>.

## **Reparaciones**

Cambie los **PELVI.LOC**<sup>®</sup> defectuosos de inmediato.

## Desechamiento

- El embalaje del dispositivo puede llevarse a un punto de reciclaje de materiales reutilizables.
- Las piezas de metal pueden llevarse a un punto de reciclaje de metales usados.
- Las piezas de plástico pueden llevarse a un punto de reciclaje de plásticos.
- El desechar debe efectuarse en conformidad con las correspondientes disposiciones legales nacionales.
- Pregunte por empresas de desechar locales a su administración municipal.



## Datos técnicos

|  | <b>XS</b> | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b>   | <b>XL</b> |
|--|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| <b>Ancho del asiento (cm)</b>            | 16 - 24   | 20 - 32  | 30 - 40  | 36 - 46    | 44 - 52   |
| <b>Tamaño del acolchado (cm)</b>         | 18 x 7    | 21 x 8   | 25,5 x 8 | 26,5 x 8,5 | 28,5 x 9  |
| <b>Peso (g)</b>                          | 220       | 220      | 280      | 280        | 300       |
| <b>Punto de rotura<br/>(a aprox. kg)</b> | 60        | 60       | 80       | 80         | 80        |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Banda dentada tam. XS - S</b>     | 1,9 x 0,2 x 40 cm |
| <b>Banda dentada tam. M - L - XL</b> | 2,4 x 0,2 x 40 cm |

Producto  
libre de látex



## Garantía

Asumimos responsabilidad por este producto en conformidad con las disposiciones legales. Esta se extiende a fallos en los materiales y en el procesamiento. De aquí quedan excluidas las piezas de desgaste y las piezas/módulos sujetos a un desgaste conforme a lo previsto, así como los daños derivados de esfuerzos excesivos, «usos no conformes a lo previsto», daños por aplicar demasiada fuerza o modificaciones/repares no permitidas. Si se produce un caso de garantía, diríjase a su vendedor especializado al que haya comprado este producto. Por motivos de responsabilidad por productos, los trabajos de reparación, revisión y mantenimiento solo pueden ser llevados a cabo por vendedores especializados autorizados, utilizando recambios originales.



### Fabricante:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Tel.: +49 (08373) 987269  
Fax: +49 (08373) 987276  
Correo electrónico: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Este producto se halla conforme con los requisitos básicos de la Directiva CE 93/42/CEE sobre productos médicos.