




PELVI.LOC® PL-3DWP -XS, -S, -M, -L

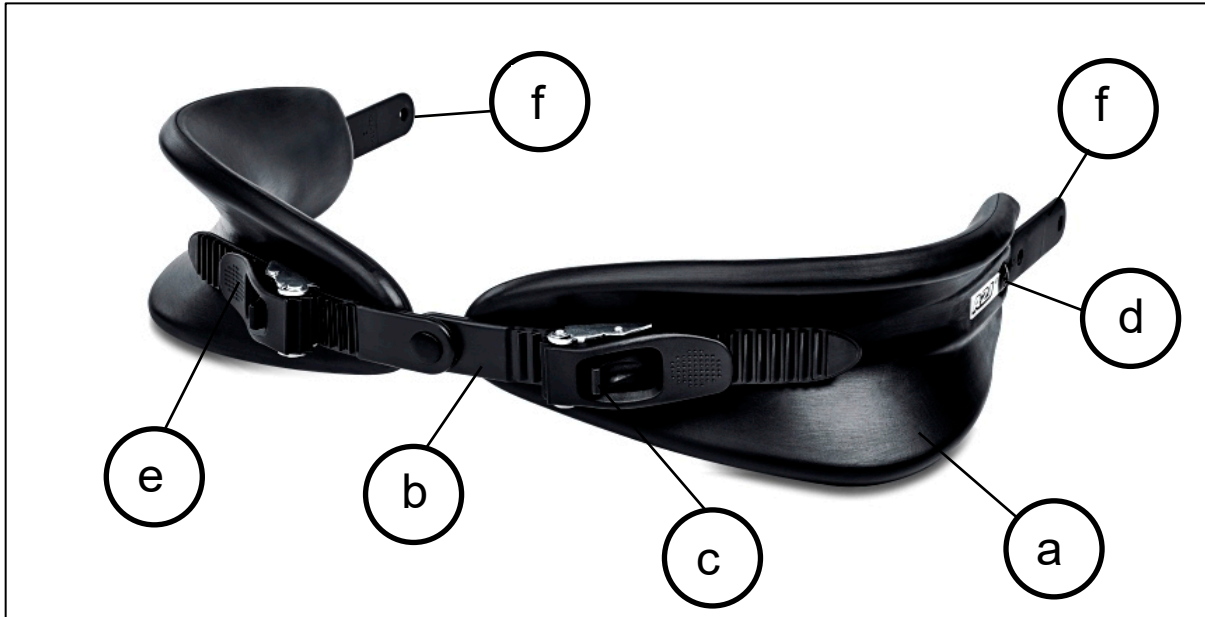

Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistaaksesi käytön turvallisuudesta.



Soveltamisala

Tätä **PELVI.LOC®** PL-3DWP Waterproof tuotetta käytetään liikuntarajoitteisten ihmisten sijoittamiseen istuimelle ja lantion taaksepäin vetämiseen. Tällaisia istuimia ovat esim. suihkupyörätuoli, kylpyalusta, pyörätuoli, istuinkuori, terapiatuoli, kuntoutusvaunu tai urheiluvälineet.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP -XS, -S, -M, -L esiasennettu
- 2) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Aseta pehmusteet (a) lantion alueella/lantion ihon taittokohdassa. - Hammashihna (b) on päällä.
 - Pehmusteen logo näkyy sitten vasemmalla puolella!
2. Säädä pehmusteiden etäisyys hammashihnan (b) avulla kiristimillä (e).
 - Hammashihnan nivelen tulisi olla keskellä pehmusteiden välissä.
 - Vedä hammashihnaa ulos vain sen verran, että kunkin soljen (c) takana on vielä kaksi hammasta.
- 3 Kiinnitä sitten rei'itetyt hihnat (f) pyörätuolin kehysputkeen
- 4 Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta niin, että reiden ja pehmusteen välillä on vielä tilaa kämmenelle.
- 5 Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita Lyhennetyt hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
- 6 Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti!



Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, hammashihna ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että nitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle - kiristimien (c) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP:n yläpuolelle - onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn hihnan ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP:tä, jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP:tä luukadon, synnyntäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



Huomio:

- **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP:tä käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan reiteen



Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. Ohjaa sitten hammastettu hihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa kiristintä (e).
3. Kiristä hammashihna (b) sen jälkeen tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
4. Varmista, että kiristimien soljet (c) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
 - Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP:n käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Käytä **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP:n **avaamiseen** solki (c) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Desinfiointi 70 % ISOPROPANOLILLA pyyhkimällä
- Älä käytä liuottimia, kuten asetonia tai lakkabensiiniä!

Huolto

PELVI.LOC[®] PL-3DWP on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC**[®] välittömästi.

Hävittäminen

- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.



Tekniset tiedot

	XS	S	M	L
Istuimen leveys (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
Pehmusteen koko (cm)	18 x 11	20 x 12	23 x 13,5	27,0 x 13,5
Paino (g)	200	220	260	320
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)	60	60	80	80

Hammashihna, koko XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Hammashihna, koko M - L	2,4 x 0,2 x 17,0 cm
Materiaali	Etyleeni-vinyyliaasettaati, suljettu, huokoinen

Tuote on
lateksiton



Takuu

Myönämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä koskee materiaali- ja käsittelyvirheitä. Tähän eivät sisälly kuluvat osat tai osat/moduulit, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia eivätkä liiallisesta käytöstä, "epäasianmukaisesta käytöstä" tai liiallisesta voiman käytöstä aiheutuneet vauriot tai luvattomista muutoksista/korjauksista aiheutuneet vauriot. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä erikoisliikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen.

Tuotevastuun vuoksi korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöitä saavat suorittaa vain valtuutetut erikoisliikkeet, joiden täytyy käyttää alkuperäisiä varaosia.



Valmistaja:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Puhelin: +49 (08373) 987269
Faksi: +49 (08373) 987276
Sähköposti: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EY:n direktiivin 93/42/ETY perusvaatimukset

Tilanne 01.05.2019

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään