




PELVI.LOC® Sedací systém Pelvi – Contour PL-CSS -S, -M, -L

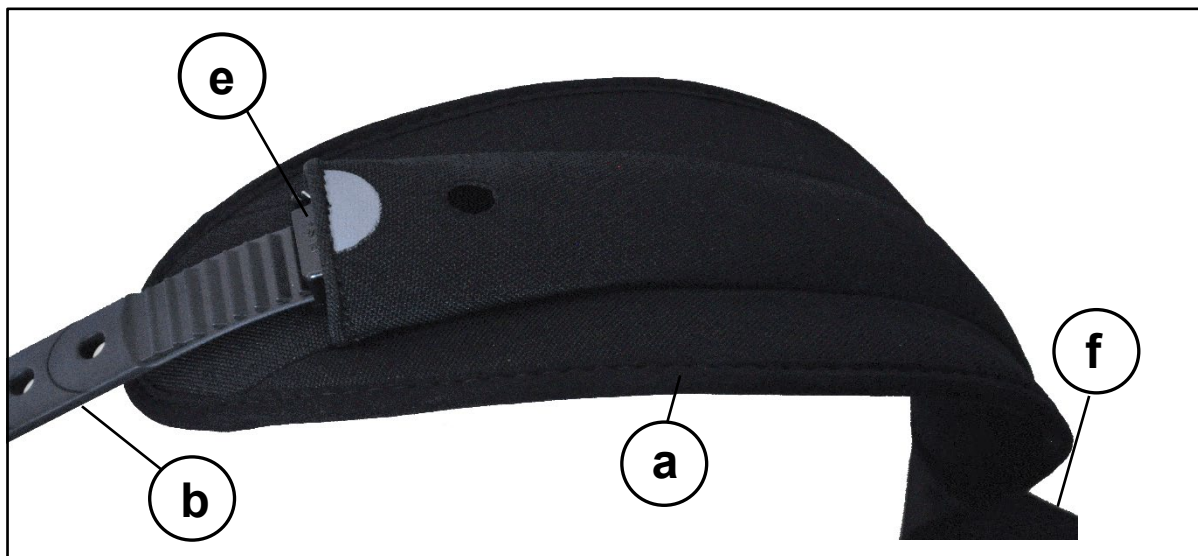

Pro bezpečné použití tohoto výrobku si přečtěte a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.



Oblast použití

Sedací systém **PELVI.LOC®** Pelvi – Contour – PL-CSS slouží k polohování a retrakci pánve pro osoby s omezenou mobilitou na sedací ploše a brání sklouznutí dopředu v invalidním vozíku, aktivním invalidním vozíku, sedací skořepině, terapeutické židli, rehabilitačním kočárku, sportovním přístroji.

Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-CSS -S, -M, -L předmontováno
- 2) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických výrobků

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny pro použití pánevního retrakčního pásu

Montáž



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

1. Polstrování (a) přiložte vždy v oblasti pánve / kyčelního záhybu / rozkroku.
2. Ozubený pás (b) upevněte na trubce sedadla invalidního vozíku (Dodržujte montážní pokyny!)
 - Pás popruhu (f) je upínán individuálně na sedací ploše invalidního vozíku.
3. Vzdálenost polstrování nastavte pomocí ozubeného pásu (b). Stisknutím tlakové spony (e) se 3D popruh napne.
4. Ozubený pás (b) napněte na obou stranách natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na plochu jedné ruky.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konců zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách ozubeného pásu!



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou děrované popruhy, pásy popruhů, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé tři měsíce **PELVI.LOC®** důkladně kontrolovat. Dbejte přitom ještě na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako jsou děrované řemeny / pásy popruhů (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. neslepujte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedejte - nebezpečí otláčených míst zvláště vlivem tlakových spon (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte za **PELVI.LOC®** - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi děrovaný pás a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přimáčknutí!

Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC®** nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytují otláčená místa, trhliny nebo jiná poškození - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC®** nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrvování - nebezpečí poranění!
- Po vyčištění zajistěte správnou funkci **PELVI.LOC®**!
- Poškozený **PELVI.LOC®** by měl být okamžitě vyměněn - nebezpečí nehody!



Pozor:

- **PELVI.LOC**[®] není součástí zadržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
- Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu zodpovědnosti za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

Použití

1. K použití **PELVI.LOC**[®] je polstrování (a) pokládáno do oblasti pánve / kyčelního záhybu.



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráňte tak bolestivým otlakům.

2. Poté ozubený pás (b) ved'te skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
 3. Následně ozubený pás (b) napněte natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
 4. Zajistěte, aby tlakové spony (e) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!
- Proved'te zkoušku tahu!

Pokud dojde během používání **PELVI.LOC**[®] k nechtěnému uvolnění polohovacího systému, pak to může být odstraněno opětovným napnutím.

K otevření **PELVI.LOC[®]** stiskněte tlakovou sponu (e) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špice hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Vhodné k praní v pračce do 40 stupňů.
- Chemicko-tepelná dezinfekce je možná přidáním ELTRA 40 do prací operace.
- Neždímejte.
- Nevhodné do sušičky.

Údržba

PELVI.LOC[®] pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy

Vadný **PELVI.LOC**[®] okamžitě vyměňte.

Likvidace


- Obal přístroje může být předán k recyklaci druhotných surovin.
- Kovové díly mohou být předány k recyklaci použitých kovů.
- Plastové díly mohou být předány k recyklaci plastů.
- Likvidace musí probíhat dle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Zeptejte se prosím správy vašeho města/obce na místní likvidační podniky.



Technické údaje

	S	M	L
Délka sedadla (cm)	30 - 35	36 - 39	40 - 46
Velikost polstrování (cm)	20 x 7	29 x 11	36 x 14
Sedací plocha (cm)	30 x 15	36 x 20	40 x 26

Ozubený pás vel. S - M - L	2,4 x 0,2 x 40 cm
-----------------------------------	-------------------

Výrobek
neobsahuje 
latex

Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme záruku dle zákonných ustanovení. Ta se týká materiálových a výrobních vad. Jsou z ní vyloučeny opotřebitelné díly a díly/konstrukční skupiny, které podléhají stanovenému opotřebenění, stejně jako škody, které vyplynou v důsledku nadměrného namáhání, použití v rozporu s určením, násilného poškození nebo nepřípustných změn/oprav. V případě záručního plnění se prosím obraťte na vašeho odborného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodů zodpovědnosti za výrobek smí být opravné, údržbové a servisní práce prováděny jen autorizovanými specializovanými prodejci s použitím originálních náhradních dílů.



Výrobce:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tel.: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
Email: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Tento výrobek splňuje Základní požadavky ES
Směrnice o zdravotních prostředcích
93/42/EHS.

